



Retrait de l'aiguille

- A** Position d'utilisation habituelle (piston horizontal), avant retrait.
- B** Basculer le piston de la position horizontale à la position verticale.
- C** Le piston est en position verticale, prêt pour le retrait de l'aiguille.
- D** → A l'aide du pouce faire descendre le piston pour le mettre en contact avec la peau. Le piston doit rester au contact de la peau durant toute la manipulation.
 - Placer l'index et le majeur sous les ailettes de l'extracteur. Retirer l'aiguille de Huber en relevant l'extracteur (mouvement de bas en haut, en maintenant le piston en contact avec la peau) jusqu'au CLIC. Cette dernière opération verrouille totalement l'aiguille et élimine tout risque de piqûre accidentelle.