

## ▶ CATHETER D'EMBOLECTOMIE

- ▶ Cathéter pour embolectomie.
- ▶ L'extrémité courte et flexible de ce cathéter permet son introduction aisée dans l'artère tout en réduisant les risques de liaisons de la plaque artérielle.
- ▶ Le ballonnet est très résistant et de forme cylindrique après son gonflage.



# ▶ CATHETER D'EMBOLECTOMIE

## ○ PROPRIÉTÉS ET RECOMMANDATIONS

- ▶ Ballon latex.
- ▶ Ces cathéters ne doivent pas être utilisés par voie veineuse : leur extrémité n'est pas conçue à cet effet.
- ▶ **GONFLAGE DU BALLONNET**  
Avant utilisation, gonfler puis dégonfler le ballonnet. Ne pas dépasser la capacité maximum indiquée car il y a risque d'éclatement.  
Ne pas utiliser d'air lors du gonflage, car la rupture du ballonnet pourrait alors entraîner une embolie gazeuse.  
Le ballonnet doit être gonflé avec une solution stérile d'eau distillée ou de chlorure de sodium, éventuellement avec un produit de contraste dilué.
- ▶ Le matériel doit être conservé dans un endroit sec et tempéré.
- ▶ Matériel stérile à usage unique. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

## ○ RÉFÉRENCES

Références	Taille	Longueur	Couleurs	Volume de liquide à injecter	Diamètre du ballon après gonflage
CEM602	2F	60 cm		0,10 ml	4 mm
CEM402	2F	40 cm		0,10 ml	4 mm
CEM803	3F	80 cm		0,20 ml	5 mm
CEM403	3F	40 cm		0,20 ml	5 mm
CEM804	4F	80 cm		0,75 ml	7 mm
CEM404	4F	40 cm		0,75 ml	7 mm
CEM805	5F	80 cm		1,50 ml	9 mm
CEM405	5F	40 cm		1,50 ml	9 mm
CEM806	6F	80 cm		2,00 ml	11 mm
CEM406	6F	40 cm		2,00 ml	11 mm
CEM807	7F	80 cm		2,50 ml	13 mm
CEM808	8F	80 cm		3,00 ml	14 mm

Ce dispositif est marqué CE par l'organisme notifié LNE-GMED

Culture Fab - REF CD 0357/006

**PEROUSE**  
MEDICAL

Division Cardiovasculaire - Route du Manoir - 60173 Ivry le Temple - France  
Tél: 33 (0) 3 44 08 17 00 - Fax: 33 (0) 3 44 08 17 01

[www.perousemedical.com](http://www.perousemedical.com)